

Toutes espèces



KADVET/FR/ED 1 - décembre 2022

INDICATIONS

- Coupures et abrasions •
- Blessures traumatiques •
- Plaies chirurgicales •
- Lésions cutanées exsudatives •
- Lésions de pression •
- Ulcères •



SPRAY POUDRE
1 x 125 ml

- CONTRÔLE OPTIMAL DE L'EXSUDAT grâce à la présence de Kaolin
- PROTÈGE les plaies des infections
- Favorise l'HYDRATATION des tissus et la RÉPARATION naturelle de la peau grâce aux agents hydratants

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Nettoyer la peau et la sécher soigneusement avant utilisation
2. Bien agiter le flacon avant utilisation
3. Appliquer une fine couche de poudre uniquement sur la zone concernée à environ 10 cm de distance
4. Après avoir pulvérisé KAdermine POUDRE VET recouvrir la plaie pour éviter le léchage
5. Appliquer une fois par jour

KAdermine
VET poudre spray

STOCKAGE

- Conserver à l'abri des rayons du soleil
- Conserver à une température comprise entre 5 et 50°C

KAdermine

poudre spray

VET

FAVORISE LA CICATRISATION DES PLAIES

KAOLIN
ASSÈCHE


Ag⁺
CHLORHEXIDINE
PROTÈGE DES
INFECTIONS

ACIDE
HYALURONIQUE
HYDRATE

*KAdermine poudre vet protège les plaies des infections
et favorise l'hydratation des tissus*



[PATENT]
PCT/IB2013/054647

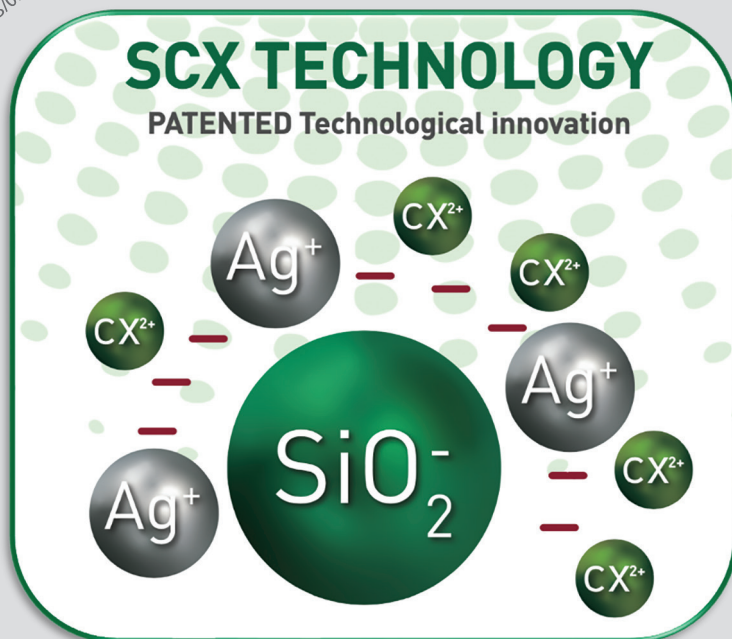

Ag⁺ est bactéricide mais photo-instable.

- Les liaisons **électrostatiques*** au dioxyde de silicium le protègent de la lumière & la chaleur (brevet).
- La chlorhexidine complète l'action d'Ag⁺.
- Ce complexe ionique (Ag⁺, SiO₂⁻, CX²⁺) est incorporé dans un film barrière à base d'acide hyaluronique et de kaolin.

(*) Liaisons électrostatiques entre SiO₂⁻, Ag⁺ et CX²⁺

CAS 1

Cheval pure race espagnole de 6 ans



Jour 1

Lésion traumatique après un accident de pâturage



Jour 1

Application de KAdermin VET poudre spray



Jour 2

Résultat après la première application de KAdermin VET poudre spray. Cicatrisation complète de la plaie au 4e jour

CAS 2

Cheval pure race espagnole de 10 ans



Jour 1

Lésion traumatique



Jour 3

Résultat après deux applications de KAdermin VET poudre spray. Cicatrisation complète de la plaie au 5e jour

(*) Use of SCX patented technology in horse wound healing : case report OBJECTIVE AND METHODS (Article complet disponible sur demande)

BIBLIOGRAPHY

- Spinabella S., Grossi I. and Carlucci F. (2004) Equine wounds healing in clinical practice. Annali della Facoltà di Medicina veterinaria, LVII/2 . pp. 155-162. ISSN 0365-4729
- Cassino R. et al. Vulnera and G.R.I.D.: two different realities in the italian wound care. EWMA – European Wound Management Association - 10th European Conference on Advances in Wound management (2000) Stockholm, Sweden
- International Consensus. Appropriate use of silver dressings in wounds. An expert working group consensus. London: Wounds International, 2012
- Cassino R., Kopniak A. 2019. L'argento tecnomolecolare in vulnologia: stato dell'arte. XV Congresso Nazionale AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee) 2-5 Ottobre 2019 - Napoli